

GUEDEL AIRWAY

Ústní vzduchovody

Návod k použití

Kód: 038-91-9xx*, 038-92-9xx*, 038-93-9xx*

* „x“ náleží celým číslem, liší se dle velikosti

CZ

Orofaryngeální vzduchovod Flexicare Guedel je určen k udržování průchodu vzduchu u pacienta v bezvědomí tím, že brání zapadnutí jazyka a zavření čelistí.


Nepoužívejte u pacientů při vědomí nebo v částečném bezvědomí, u nichž může být přítomen dáivý reflex.

1. Vhodnou délku vzduchovodu Guedel lze odhadnout podle vzdálenosti od nosní dírky k ušnímu lalůčku pacienta nebo podle úhlu čelistí.
2. U pacienta v poloze vleže na zádech s úplně vzpřímenou hlavou a nataženým krkem naneste na vzduchovod Guedel malé množství lubrikantu rozpustného ve vodě a zasuňte ho do úst pacienta horní stranou dolů (s vnitřním zakřivením obráceným k temenu pacientovy hlavy).
3. Až se bude vzduchovod dotýkat tvrdého patra, během posunování ho otočte o 180° a ujistěte se, že jazyk je zajištěn na místě.

U pediatrických pacientů je možné vkládat vzduchovod Guedel „pravou stranou nahoru“, aby nedošlo k zatlačení jazyka k hltanu.

POZOR

- Při obnovení dáivého reflexu vyjměte vzduchovod.
- Vhodný k používání po dobu až 24 hodin.

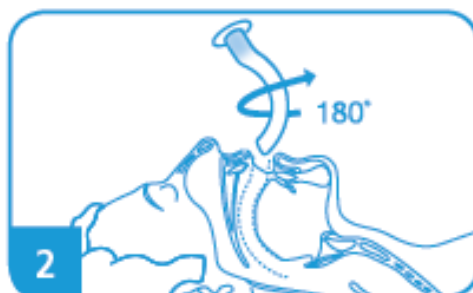

DÉLKA (CM)	VELIKOST	BARVA ZAKUSOVACÍHO BLOKU
4	000	Růžová
5	00	Modrá
6	0	Černá
7	1	Bílá
8	2	Zelená
9	3	Oranžová
10	4	Červená
12	5	Žlutá

flexicare
TOTAL QUALITY • TOTAL CARE

CE
1639



STERILE EO



Product is not
made with
Phthalate DEHP



Product is not
made with
natural rubber
latex



Flexicare Medical Limited.
Cynon Valley Business Park,
Mountain Ash,
CF45 4ER, UK.

☎ +44 (0)1443 474647

☎ +44 (0)1443 474222

@ enquiries@flexicare.com

🌐 www.flexicare.com

FC3171
VP5400-98

Datum vydání 052020